

Gebrauchshinweise

Produktname

Medi-Inn Steckbecken

Produktbeschreibung

Die Medi-Inn Steckbecken dienen dazu, die Kot- und Urinausscheidungen bei zeitweiligen oder dauerhaften immobilen/bettlägerigen Patienten sicher aufzunehmen. Zur Abdeckung der Steckbecken während des Transports dient ein passender Deckel.

Verwendungszweck / Indikation

Das Steckbecken dient dem Auffangen von Kot- und Urinausscheidungen bei zeitweiligen oder dauerhaften bettlägerigen/immobilen Personen.

Anwendungshinweise

- Das Steckbecken ist vor jedem Gebrauch auf seine Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
- Nach Gebrauch verschließen.
- Das Steckbecken nach jedem Gebrauch leeren und aufbereiten.
- Um das Kontaminationsrisiko zu senken sind nach jeder Reinigung die Hände zu desinfizieren.
- Das Steckbecken eignet sich sowohl für den Einsatz in der Alten- und Krankenpflege als auch für den privaten Gebrauch.

Haltbarkeit

Das Steckbecken kann so oft aufbereitet und wiederverwendet werden, bis Schäden an der Oberfläche wie Risse, Kerben oder starke Verfärbungen sichtbar sind oder das Steckbecken verbogene Teile aufweist, so dass eine sichere Anwendung nicht mehr gewährleistet werden kann. Das Steckbecken ist in diesem Fall gemäß den Entsorgungshinweisen zu entsorgen.

Lagerungshinweise

Trocken zwischen 5 °C bis 40 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgungshinweise

Das Steckbecken ist entsprechend den gültigen Vorschriften zu entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte müssen gemäß den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und/oder infektiösen Materialien entsorgt werden.

Aufbereitung

Für den privaten Gebrauch:

Reinigen Sie das geleerte Steckbecken vor dem Desinfizieren gründlich von innen und außen mit einem milden Reinigungsmittel. Anschließend mit warmen Wasser abspülen. Achten Sie bei einer anschließenden Lagerung darauf, dass das Steckbecken vollständig trocken ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Manuelle Desinfektion:

Das geleerte Steckbecken mit einem geeigneten hautverträglichen Desinfektionsmittel von innen und außen reinigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals. Dabei sind die Anwendungshinweise des Desinfektionsmittels zu beachten. Achten Sie bei einer anschließenden Lagerung darauf, dass das Steckbecken vollständig trocken ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Thermische Desinfektion:

Setzen Sie das Steckbecken samt Inhalt in ein geeignetes Reinigungs- und Desinfektionsgerät. Das Steckbecken nicht vorher manuell entleeren. Falls der Deckel geschlossen sein sollte, diesen wieder öffnen. Starten Sie eine geeignete Programmwahl des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes. Nach dem Reinigungsvorgang das gereinigte und desinfizierte Steckbecken entnehmen. Achten Sie bei einer anschließenden Lagerung darauf, dass das Steckbecken vollständig trocken ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Die Medi-Inn Steckbecken sind der Risikokategorie „semikritisch A“ einzustufen und sollten daher vorzugsweise einer maschinellen Reinigung (thermische Desinfektion) unterzogen werden.

Warnhinweise

- Nur für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung und/oder das Produkt bereits geöffnet oder beschädigt ist.
- Ohne entsprechende Aufbereitung darf das Steckbecken nicht wiederverwendet oder gelagert werden, da sonst die Gefahr einer Kreuzkontamination besteht.
- Befolgen Sie bei der thermischen Desinfektion die Anweisungen des Herstellers für das Reinigungs- und Desinfektionsgerät.
- Nicht für sterile Bereiche geeignet.

Hinweis für Anwender und Patienten

Bitte melden Sie schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetreten sind, dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Anwender und/oder Patient befindet.

