

Gebrauchsanweisung

Produktname

Medi-Inn Urinflaschen (Männer / Frauen)

Produktbeschreibung

Medi-Inn Urinflaschen für Männer oder Frauen sind ein flüssigkeitsdichtes Auffanggefäß aus Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder Polycarbonat (PC). Sie verfügen über eine Verschlusskappe mit der die Urinflasche geschlossen werden kann.

Verwendungszweck / Indikation

Die Urinflasche dient dem Auffangen von Urin bei bettlägerigen Patienten oder vorrübergehend immobilen Personen.

Anwendungshinweise

- Die Urinflasche ist vor jedem Gebrauch auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
- Die Urinflasche kann im Sitzen oder im Liegen verwendet werden.
- Nach Gebrauch verschließen.
- Urinflaschen nach jedem Gebrauch leeren und aufbereiten.
- Um das Kontaminationsrisiko zu senken sind nach jeder Reinigung die Hände zu desinfizieren.
- Die Urinflaschen eignen sich sowohl für den Einsatz in der Alten- und Krankenpflege als auch für den privaten Gebrauch.

Haltbarkeit

Die Urinflasche kann so oft aufbereitet und wiederverwendet werden, bis Schäden an der Oberfläche wie Risse, Kerben oder starke Verfärbungen sichtbar sind oder die Urinflasche verbogene Teile aufweist, so dass eine sichere Anwendung der Urinflasche nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Urinflasche ist in diesem Fall gemäß den Entsorgungshinweisen zu entsorgen.

Lagerungshinweise

Trocken zwischen 5 - 40 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Warnhinweise

- Nur für den Kontakt mit intakter Haut bestimmt.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung und / oder das Produkt bereits geöffnet oder beschädigt ist.
- Ohne entsprechende Aufbereitung darf die Urinflasche nicht wiederverwendet oder gelagert werden, da sonst Gefahr einer Kreuzkontamination besteht.
- Befolgen Sie bei der thermischen Desinfektion die Anweisungen des Herstellers für das Reinigungs- und Desinfektionsgerät.
- Nicht für sterile Bereiche geeignet.

Entsorgungshinweise

Die Urinflasche ist entsprechend den gültigen Vorschriften zu entsorgen. Durch chemische oder biologische Substanzen verunreinigte Produkte müssen gemäß den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien und/oder infektiösen Materialien entsorgt werden.

Aufbereitung

Für den privaten Gebrauch:

Reinigen Sie die geleerte Urinflasche vor dem Desinfizieren gründlich von innen und außen mit einem milden Reinigungsmittel. Anschließend mit warmem Wasser abspülen. Achten Sie bei einer anschließenden Lagerung darauf, dass die Urinflasche vollständig trocken ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Manuelle Desinfektion:

Die geleerte Urinflasche mit einem geeigneten hautverträglichen Desinfektionsmittel von innen und außen reinigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals. Dabei sind die Anwendungshinweise des Desinfektionsmittels zu beachten. Achten Sie bei einer anschließenden Lagerung darauf, dass die Urinflasche vollständig trocken ist, um Schimmelbildungen zu vermeiden.

Thermische Desinfektion:

Setzen Sie die Urinflasche samt Inhalt in ein geeignetes Reinigungs- und Desinfektionsgerät. Die Urinflasche nicht vorher manuell entleeren. Falls der Deckel der Urinflasche geschlossen sein sollte, diesen wieder öffnen. Starten Sie eine geeignete Programmwahl des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes. Nach dem Reinigungsvorgang die gereinigte und desinfizierte Urinflasche entnehmen. Achten Sie bei einer anschließenden Lagerung darauf, dass die Urinflasche vollständig trocken ist, um Schimmelbildungen zu vermeiden.

Autoklavierung:

Achtung! Die Urinflasche aus Polyethylen (PE) darf nur bis zu 90 °C desinfiziert und **nicht** autoklaviert werden. Die Informationen über das Material der Urinflasche kann auf dem Materialstempel auf dem Boden der Urinflasche abgelesen werden.

Achtung! Die **Deckel** der Urinflaschen sind **nicht autoklavierbar** und müssen mit einer manuellen oder thermischen Desinfektion gereinigt werden.

Die Urinflaschen müssen vor dem Autoklavieren sorgfältig gereinigt werden. Siehe hierzu den Punkt Manuelle Desinfektion oder Thermische Desinfektion. Die Urinflaschen aus PP und PC sind bis 134 °C autoklavierbar. Die Dauer der Reinigung richtet sich nach den Herstellerangaben des Autoklaven und nach den empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Die Medi-Inn Urinflaschen (Männer / Frauen) sind der Risikokategorie „semikritisch A“ einzustufen und sollten daher vorzugsweise einer maschinellen Reinigung unterzogen werden.

Bitte beachten Sie, dass thermische Einflüsse zu einer Eintrübung des Materials führen können.

Rechtlicher Hinweis

Bitte melden Sie schwerwiegende Vorfälle, die im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetreten sind, dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Anwender und/oder Patient befindet.