




## SOFT 0 - 7

Attends Soft sind saugfähige und besonders diskrete Einlagen, die speziell für empfindliche Haut entwickelt wurden. Sie sind bei sehr leichter bis starker Harninkontinenz geeignet.




### Anlegehinweise

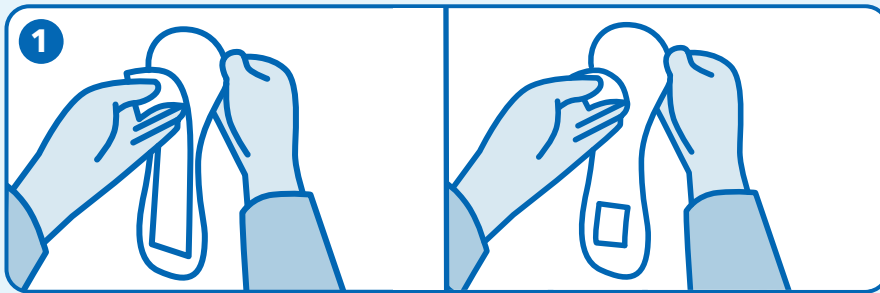


1 Entfernen Sie den durchgängigen Abziehstreifen von der Rückseite der Einlage (Soft 0-4).

2 Entfernen Sie die beiden kurzen Abziehstreifen von der Rückseite der Einlage (Soft 5-7).

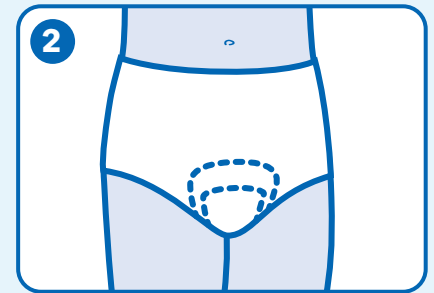

3 Befestigen Sie die Einlage mit der klebenden Seite in Ihrer möglichst enganliegenden Unterwäsche.

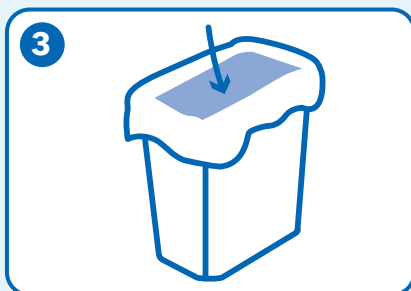

3 Rollen Sie das Produkt nach Gebrauch zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.

## SOFT 0 - 7

### Hinweise und Tipps

#### Produktauswahl

- Wählen Sie die passende Produktgröße und Saugstärke.
- Für eine optimale Produktleistung empfiehlt es sich, die Einlage in möglichst enganliegender Unterwäsche zu tragen.
- Durch die Auswahl des kleinstmöglichen Produktes und einer ausreichenden Saugstärke sparen Sie Abfall und reduzieren die Umweltbelastung im Vergleich zu einer unnötig hohen Saugstärke.

#### Entsorgung

- Rollen Sie das Produkt zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.
- Wenn vorhanden, können Sie zum Entsorgen das gebrauchte Produkt in eine frische Einzelverpackung einwickeln.
- Entsorgen Sie das Produkt auf keinen Fall über die Toilette.



**Hautverträglichkeit** bestätigt von proderm Institut für Angewandte Dermatologische Forschung. Getestet im Auftrag von Attends.