

Technisches Datenblatt

MEDI-INN CLASSIC

Wandspender Aluminium

Produktbeschreibung

Aluminium Wandspender inkl. Befestigungsmaterial

Regulatorische Informationen

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit.

Produktdaten

Produktvarianten

Artikelnr.	Variante	Hebel	Euroflasche	H x B x T (mit Hebel)
N10075-STD	Mit Verschlussblende	Lang	500 ml	24,2 x 8,3 x 23,5 cm
N16411-STD	Mit Verschlussblende	Lang	1000 ml	29,0 x 9,5 x 23,5 cm
N12311-STD	Mit Verschlussblende	Kurz	1000 ml	29,0 x 9,5 x 16,5 cm
N16410-STD	Mit Verschlussblende	Kurz	500 ml	24,5 x 8,5 x 16,0 cm
N11468-STD	Mit Leerflasche	Lang	500 ml	24,2 x 8,3 x 22,5 cm
N16474-STD	Mit Leerflasche	Lang	1000 ml	29,0 x 9,5 x 23,5 cm
N16412-STD	Mit Leerflasche	Kurz	500 ml	24,5 x 8,5 x 16,0 cm

Produktdesign

Material Gehäuse	Aluminium
Material Pumpe	Edelstahl / Kunststoff
Material Hebel	Edelstahl
Flaschengröße	500 ml oder 1000 ml Euroflasche
Hebel	Langarm oder Kurzarm
Farbe	Silber / Weiß
Hinweise	Wandspender müssen in regelmäßigen Abständen gemäß den Reinigungs- und Desinfektionsanweisungen aufbereitet werden.

Zubehör/Ersatzteile

Artikelnr.	Produkttyp
N18026	Tropfschale aus Edelstahlblech mit Kunststoffschale 500 ml
N15758	Tropfschale Edelstahlrahmen mit Kunststoffschale 1000 ml
N13268-STD	Tropfschale Edelstahlrahmen mit Kunststoffschale 500 ml
N13196	Ersatzpumpe Edelstahl 500 ml
N18263	Ersatzpumpe 500 ml
N14565	Ersatzpumpe Edelstahl 1000 ml

Logistik Informationen

Artikelnr.	Menge in der Einzelverpackung	Art der Einzelverpackung	Einzelverpackung pro Karton	Kartonmaße (T x H x B)
N10075-STD	1 Stk	Box	10 Stk	62,0 x 50,0 x 26,5 cm
N16411-STD	1 Stk	Box	10 Stk	56,0 x 35,0 x 50,0 cm
N12311-STD	1 Stk	Box	10 Stk	56,0 x 38,0 x 35,0 cm
N16410-STD	1 Stk	Box	10 Stk	62,0 x 50,0 x 26,5 cm
N11468-STD	1 Stk	Box	10 Stk	62,0 x 50,0 x 26,5 cm
N16474-STD	1 Stk	Box	10 Stk	56,0 x 35,0 x 50,0 cm
N16412-STD	1 Stk	Box	10 Stk	51,0 x 30,0 x 35,0 cm
N18026	1 Stk	Polybeutel	60 Stk	46,0 x 29,0 x 23,0 cm
N15758	1 Stk	Polybeutel	20 Stk	41,0 x 17,0 x 41,0 cm
N13268-STD	1 Stk	Polybeutel	10 Stk	40,0 x 16,0 x 40,0 cm
N13196	1 Stk	Polybeutel	100 Stk	42,0 x 42,0 x 40,0 cm
N18263	1 Stk	Polybeutel	100 Stk	42,0 x 42,0 x 40,0 cm
N14565	50 Stk	Polybeutel	100 Stk	52,0 x 42,0 x 40,0 cm
Lagerungshinweise	Trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.			

Qualitätszertifikate

Unser Unternehmen ist nach dem Standard EN ISO 13485:2016 zertifiziert.

HARTMANN



Sterillium®

Der Klassiker der alkoholischen Händedesinfektion mit sehr guter Hautverträglichkeit. Inaktiviert Noroviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion.



Produkteigenschaften

- Breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzid PLUS
- Ganzjahresprodukt mit bewährtem Hautpflegekomplex
- Sehr gut hautverträglich und rückfettend
- Erhöht die Hautfeuchtigkeit, erhält die Hautelastizität sowie die natürliche Glätte der Haut
- Erhält den natürlichen pH-Wert der Haut

Anwendungsgebiete

Ganzjahresprodukt für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Für alle hygienerelevanten Bereiche im Gesundheitswesen und Industrie geeignet, in denen Wert auf breite Wirksamkeit bei sehr guter Hautverträglichkeit gelegt wird.

Anwendung und Dosierung

Hygienische Händedesinfektion:

3 ml unverdünnt in die trockenen Hände einreiben, dabei alle Hautpartien erfassen. Besonders auf Fingerkuppen und Daumen achten. Die Hände über die gesamte Einwirkzeit von 30 Sekunden feucht halten.

Chirurgische Händedesinfektion:

Trockene Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen sorgfältig mit dem Präparat einreiben. Hände gezielt behandeln. Dabei besonderes Augenmerk auf die Fingerspitzen, auf die Handflächen und insbesondere die Daumenpartien legen. Die Hände und Unterarme müssen während 1,5 Minuten vollständig benetzt sein.

Wirksamkeit	Prüfmethode	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze		
Hygienische Händedesinfektion	VAH / EN 1500	30 Sek.
Chirurgische Händedesinfektion	VAH / EN 12791	1,5 Min.
Bakterizidie	EN 13727	15 Sek.
Levurozidie	EN 13624	15 Sek.
Tuberkulozidie	EN 14348	30 Sek.
Mykobakterizidie	EN 14348	30 Sek.
Viren		
Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / EN 14476	15 Sek.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	1 Min.
Norovirus	EN 14476	30 Sek.
RKI-Listung		
Mittel zur Desinfektion nach behördlicher Anordnung gem. § 18 IfSG	Bereich A	30 Sek.
	Bereich begrenzt viruzid	30 Sek.

Wirkstoff pro 100 g

Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g

Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

Sterillium®



Listung

RKI-Liste, VAH, IHO Desinfektionsmittelliste

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen hellblau, klar
Dichte (bei 20 °C) ca. 0,85 g/cm³
Flammpunkt 23 °C
(gem. DIN 51755)

Haltbarkeit

Im geöffneten, aber wieder fest verschlossenen Originalgebinde, mit aufgeschraubter Einmalpumpe oder im Eurospender 1 plus / 1 plus touchless: 12 Monate.

Produktabmessung (L/B/H)

50 ml Flasche: 4,9 x 2,5 x 8,3 cm
100 ml Flasche: 6,1 x 2,7 x 13,1 cm
500 ml Flasche: 7 x 7 x 17 cm
1000 ml Flasche: 8,5 x 8,5 x 21,5 cm

Klassifizierung

Arzneimittel BfArM Zul. Nr. 603.00.01

Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER

Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111

E-Mail: science-center@hartmann.info



Wir forschen für
den Infektionsschutz
hartmann-science-center.com

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
Sterillium® Klinikpackungen	100 ml Flasche	980 547	-	45
	500 ml Flasche	980 552	-	20
	1Liter Flasche	980 546	-	10
Sterillium® Originalpackungen	100 ml Flasche	982 059	-	45
	500 ml Flasche	982 056	00970709	20
	1Liter Flasche	982 057	01494079	10
	5 Liter Kanister	982 058	02465200	1
Sterillium® Apothekenversion	50 ml Flasche	981 069	06127658	20
	100 ml Flasche	981 216	00970690	20

Sterillium, Lösung zur Anwendung auf der Haut: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85%, Tetradecan-1-ol, Patentblau V 85%, Gereinigtes Wasser, Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene und Linalool. **Anwendungsgebiete:** Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. **Gegenanzeigen:** Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Dieses Arzneimittel enthält einen Duftstoff mit Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene und Linalool. Duftstoffe können allergische Reaktionen hervorrufen. Benzylalkohol kann leichte Reizungen hervorrufen. **Warnhinweise:** Enthält einen Duftstoff mit Benzylalkohol, Citral, Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene und Linalool.

Pharmazeutischer Unternehmer: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg. (Stand: 03/2021)



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0
Fax +49 (0) 7321-36-36
info@hartmann.info
www.hartmann.info