


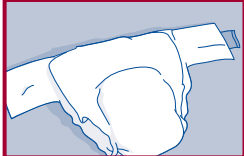
Attends® Adjustable



Anleheinweise Attends Adjustable

Attends Adjustable können auf unterschiedliche Art und Weise angelegt werden. Alle drei Anlegungsmöglichkeiten funktionieren jeweils im Sitzen, Stehen oder Liegen.


Vorbereitung

- | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|---|---|
| <p>1</p> |  | <p>Messen Sie jeweils den Bauch- und den Hüftumfang. Nehmen Sie den höheren Wert und wählen Sie danach die Produktgröße aus.</p> | <p>2</p> |  | <p>Falten Sie das Produkt inklusive der Seitenflügel komplett auf. Stellen Sie sicher, dass der Hüftbund mit den Verschlüssen hinten ist. Die bedruckte Seite muss außen und die weiche Vlies-Seite innen liegen.</p> |
|-----------------|--|--|-----------------|---|---|

1. Möglichkeit: Offen am Körper anlegen

- | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------|--|---|
| <p>3</p> |  | <p>Falten Sie das Produkt auf und formen Sie den aufsaugenden Teil in Längsrichtung zu einem "Schiffchen".</p> | <p>4</p> |  | <p>Führen Sie das offene Produkt zwischen den Beinen hindurch. Dabei bildet der aufgedruckte blaue Streifen auf der Außenseite des Produktes (Nässeindikator) die Verlängerung der Wirbelsäule.</p> |
| <p>5</p> |  | <p>Legen Sie das Produkt an Gesäß und Bauch an und schließen Sie die Klettverschlüsse. Dies ist überall auf der Vorderseite des Produktes möglich.</p> | <p>6</p> |  | <p>Die Klettverschlüsse können bei Bedarf erneut geöffnet, nachgestellt und wieder verschlossen werden.</p> |


2. Möglichkeit: Durchschlüpfen mit einem Bein

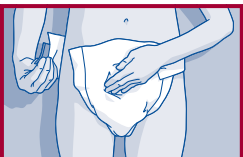- | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------|--|--|
| <p>3</p> |  | <p>Schließen Sie auf einer Seite den Klettverschluss, bevor Sie das Produkt anlegen. Formen Sie den aufsaugenden Teil in Längsrichtung zu einem "Schiffchen".</p> | <p>4</p> |  | <p>Schlüpfen Sie mit einem Bein durch den geschlossenen Beinausschnitt. Dabei bildet der Nässeindikator auf der Außenseite die Verlängerung der Wirbelsäule.</p> |
| <p>5</p> |  | <p>Legen Sie das Produkt nun vollständig an, indem Sie das Produkt hochziehen und komplett verschließen. Drücken Sie die Verschlüsse fest an.</p> | <p>6</p> |  | <p>Die Klettverschlüsse können bei Bedarf erneut geöffnet, nachgestellt und wieder verschlossen werden.</p> |

Anleheinweise, Seite 2


3. Möglichkeit: Anziehen wie Unterwäsche

3

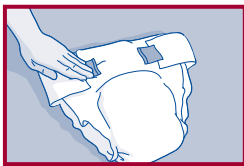


Schließen Sie die Klettverschlüsse locker auf beiden Seiten, bevor Sie das Produkt anlegen. Formen Sie den aufsaugenden Teil in Längsrichtung zu einem "Schiffchen".

4

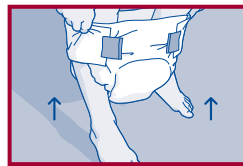


Schlüpfen Sie mit beiden Beinen in das Produkt. Dabei bildet der Nässeindikator auf der Außenseite des Produktes die Verlängerung der Wirbelsäule.

5

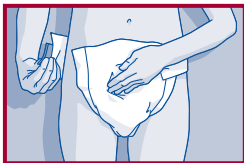

Öffnen Sie nun bei Bedarf die Verschlüsse nochmals und fixieren Sie das Produkt, so dass es körpernah sitzt, aber nicht einengt oder spannt.

6

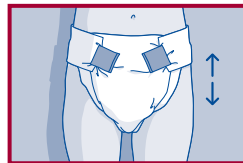

Für einen optimalen Sitz können die Verschlüsse bei Bedarf erneut geöffnet, nachgestellt und wieder verschlossen werden.

Hinweise und Tipps

Produktauswahl

- Wählen Sie die Größe der Adjustable nach dem Bauch- bzw. Hüftumfang. Nehmen Sie dabei den größeren der beiden Werte.

Auslaufschutz

- Prüfen Sie, ob das Produkt zu klein oder zu groß ist.
- Prüfen Sie, ob Sie das Produkt richtig angelegt haben.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.

Anlegen

- Falten Sie das Produkt in Längsrichtung zu einem "Schiffchen".
- Streifen Sie den gekräuselten Saum der Beinbündchen nach dem Anlegen immer nach außen.
- Das Hüftband mit den Klettverschlüssen kommt nach hinten an den Rücken.
- Achten Sie darauf, dass der Nässeindikator mittig sitzt.
- Die Klettverschlüsse können überall auf der Vorderseite des Produktes geschlossen werden. Bitte nach dem Verschließen andrücken.
- Für einen optimalen Sitz können die Verschlüsse bei Bedarf erneut geöffnet, nachgestellt und wieder verschlossen werden.

Produktwechsel

- Der Nässeindikator (blauer Streifen auf der Produktrückseite) zeigt an, wie stark das Produkt ausgelastet ist. Der Streifen beginnt zu verschwimmen. Wenn mehr als die Hälfte verschwommen ist, sollten Sie das Produkt wechseln.
- Verwenden Sie das Produkt nach dem Toilettengang weiter, wenn es noch trocken und sauber ist.
- Kleben Sie die Klebestreifen nicht auf die Haut.
- Entfernen Sie gebrauchte Einlagen von vorne nach hinten.
- Säubern Sie den Intimbereich immer von vorne nach hinten.
- Vermeiden Sie ein Zuviel an fetthaltigen Cremes sowie Puder. Diese können die Saugfähigkeit der Produkte beeinträchtigen.

Attends® Adjustable



Die Hautfreundlichkeit von Attends Adjustable ist bestätigt von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung.